



# **BIOGENA**

ul. Al. Wojska Polskiego 30A  
10-229 Olsztyn  
tel. 781 330 656

## **Instrukcja wysyłki próby – Krew EDTA – test BB PCR end point.**

Pudełko styropianowe zawiera:

1. K - próbówka EDTA 2x2 ml
2. 1 – wkład chłonny
3. 2 – wkład chłodzący
4. 3 – aseptyczne rękawiczki

1. Pracuj w rękawiczkach!
2. Wyjmij z torebki foliowej i umieść wkłady „2” w zamrażalniku lodówki na minimum 6 godz.
3. Przed pobraniem krwi umieść wkłady „2” w torebce foliowej i przenieś do pudła styropianowego
4. Pobierz krew do próbówki „K” w punkcie poboru krwi – 2 x 2 mililitry
5. Umieść próbówkę z materiałem badawczym w torebce, a następnie umieść w pudle styropianowym
6. Szczelnie zabezpiecz pudełko styropianowe od zewnątrz, do czasu odebrania przez kuriera przechuj w chłodnym miejscu – (próba nie może ulec zamrożeniu)
7. Umów się z kurierem TNT Express – Dział medyczny - na odbiór przesyłki tel.: (22) 77-17-170
  - a. Przesyłka musi być nadana w tym samym dniu co pobranie krwi
8. Nadaj paczkę **Express-12**.
9. Nadaj paczkę między: poniedziałek – środa, nie wysyłaj przed świętami i dniami wolnymi.
10. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 781 330 656

- prosimy o poinformowaniu SMS-em na numer tel. 781 330 656 o nadaniu przesyłki

- prosimy dołączyć do przesyłki wypełniony i podpisany formularz zlecający badanie

- prosimy o przełanie na konto 230 PLN; 170 PLN test PCR Borelioza, 60 PLN koszty manipulacyjne – kurier, zestaw wysyłkowy.

**BIOGENA Sp. z o. o.**

Bank BPH: 76 1060 0076 0000 3380 0007 8847

Tytuł: Nazwisko test PCR BB